



MANUALE DI ISTRUZIONE
(conservare per referenze future)

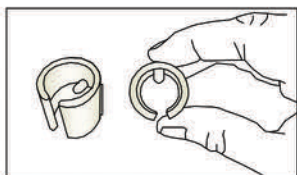

SEDILE PER VASCA CON SEDUTA REGOLABILE
IN MASSELLO LARICE REGOLABILE art. 201 Portata Kg 120


e versione telaio bianco Art.163

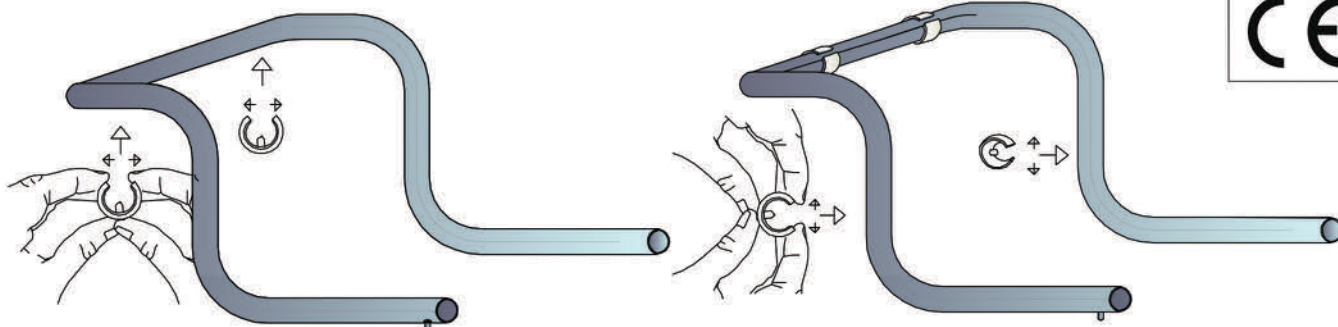


A. Montare le "pinze con piolo" in plastica in corrispondenza dei fori sulle maniglie di appoggio (vedi figure sopra) . Accertarsi che i pioli sia ben inserito nel foro.

B. Inserire le maniglie di appoggio nel telaio della seduta (Una leggera forzatura è voluta per frenare lo scorrimento) premere il piolo per inserirlo e posizionarlo in uno dei 5 fori in funzione della larghezza della vasca .

Posizionare il sedile sulla vasca, considerando la larghezza interna della vasca da bordo a bordo, compreso tra cm 66 e massimo cm 75. Non si garantisce la tenuta del sedile al di fuori di tali valori. Mantenere la seduta centrata rispetto ai punti di appoggio delle maniglie.

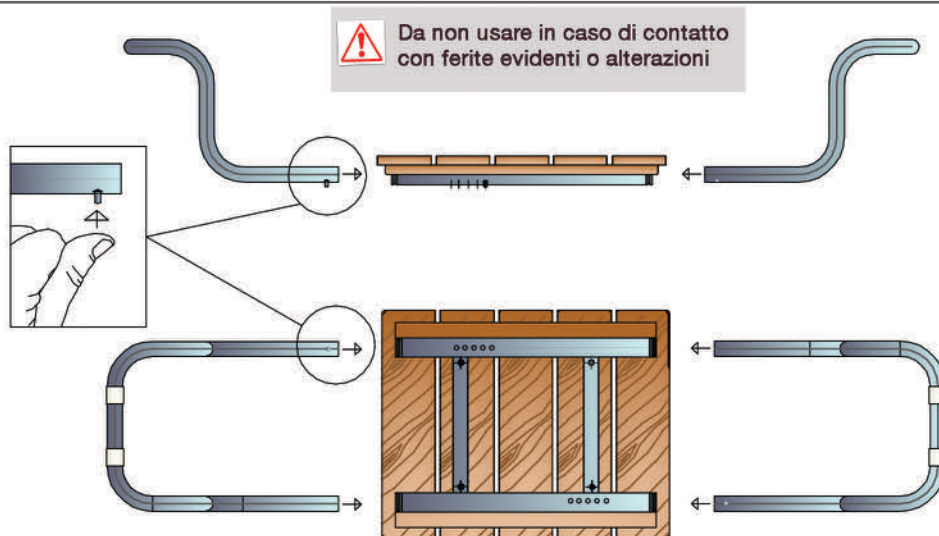


C. Risultato finale

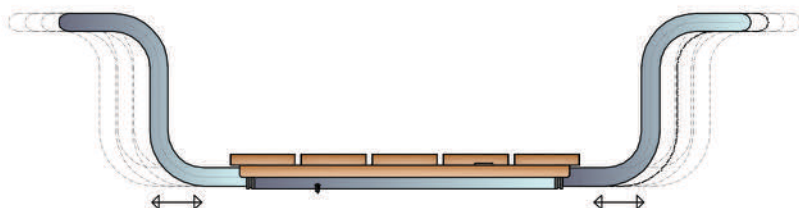

Mantenere sempre una posizione corretta una volta seduti sul sedile evitando sbilanciamenti eccessivi e sedendosi al centro della seduta. Prima di ogni utilizzo e comunque periodicamente, verificare il corretto assetto del sedile per vasca. Mantenere all'asciutto il sedile dopo l'utilizzo.

MANUTENZIONE:

lavare periodicamente il sedile con sapone neutro. Accertarsi che le parti siano correttamente montate e i pioli di fermo delle maniglie e dello schienale negli appositi spazi.

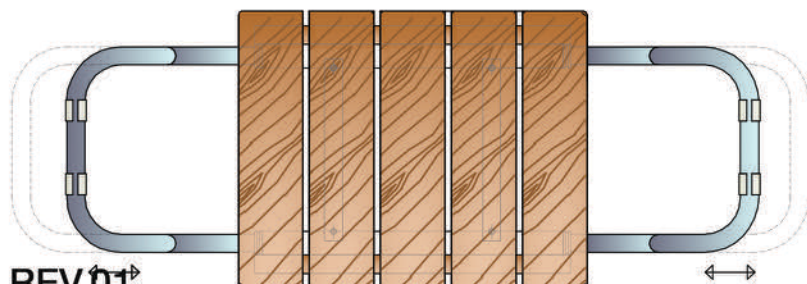

REV.01

-Questo prodotto contiene piccole parti che, se ingerite, potrebbero provocare soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
-Superfici particolarmente lisce possono aver un effetto negativo sulla resistenza allo slittamento.

-Non salire sul sedile
-Non sollevare con persona seduta

