






**MANUALE DI ISTRUZIONE**  
(conservare per referenze future)

**SEDILE PER VASCA CON SEDUTA e SCHIENALE REGOLABILI  
IN MASSELLO LARICE art. 202 Portata Kg 120**

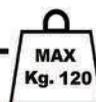


**E ART. 164 TELAIO BIANCO**

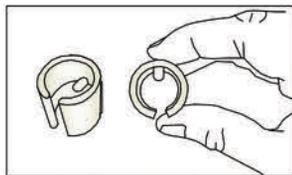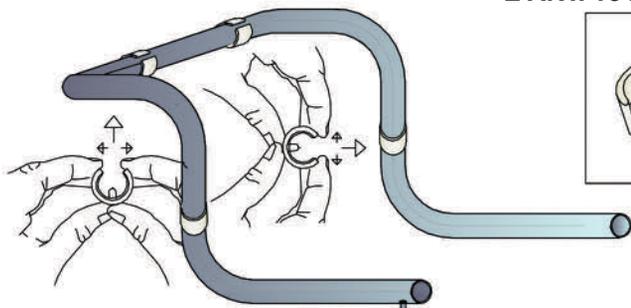


**A.** Montare le "pinze con piolo" in plastica in corrispondenza dei fori sulle maniglie di appoggio ( vedi figure di fianco) Accertarsi che i pioli sia ben inserito nel foro.

Da non usare in caso di contatto con ferite evidenti o alterazioni

**B.** Inserire le maniglie di appoggio nel telaio della seduta ( Una leggera forzatura è voluta per frenare lo scorrimento) premere il piolo per inserirlo e posizionarlo in uno dei 5 fori in funzione della larghezza della vasca ( vedi dettaglio 2.) Posizionare il sedile sulla vasca, considerando la larghezza interna della vasca da bordo a bordo, compreso tra cm 66 e massimo cm 75. Non si garantisce la tenuta del sedile al di fuori di tali valori. Mantenere la seduta centrata rispetto ai punti di appoggio delle maniglie. Inserire lo schienale e fermare con il piolo inserito nell'apposito foro. ( vedi dettaglio 1.)

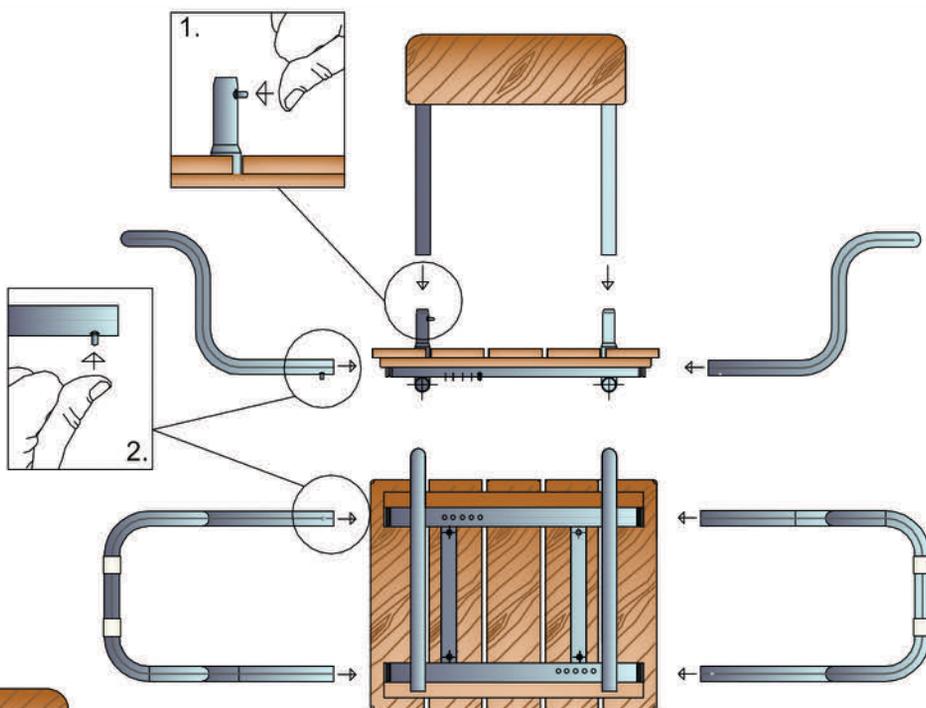

**C.** Risultato finale

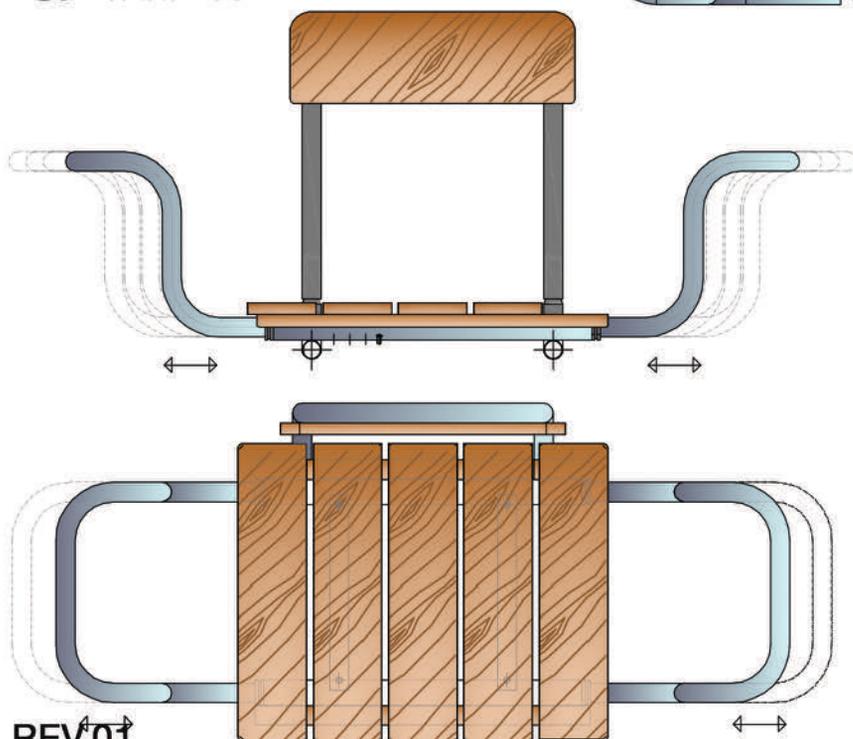

Mantenere sempre una posizione corretta una volta seduti sul sedile evitando sbilanciamenti eccessivi e sedendosi al centro della seduta. Prima di ogni utilizzo e comunque periodicamente, verificare il corretto assetto del sedile per vasca. Mantenere all'asciutto il sedile dopo l'utilizzo.

**MANUTENZIONE:**

lavare periodicamente il sedile con sapone neutro. Accertarsi che le parti siano correttamente montate e i pioli di fermo delle maniglie e dello schienale negli appositi spazi.

-Questo prodotto contiene piccole parti che, se ingerite, potrebbero provocare soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
-Superfici particolarmente lisce possono aver un effetto negativo sulla resistenza allo slittamento.

-Non salire sul sedile  
-Non sollevare con persona seduta

