





MANUALE DI ISTRUZIONE
(conservare per referenze future)

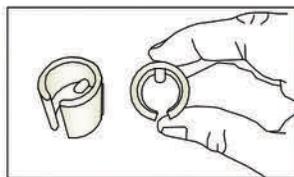


SEDILE PER VASCA CON SEDUTA e SCHIENALE REGOLABILE
IN POLIPROPILENE art. 204 Portata Kg 120
E ART.169 TELAIO BIANCO

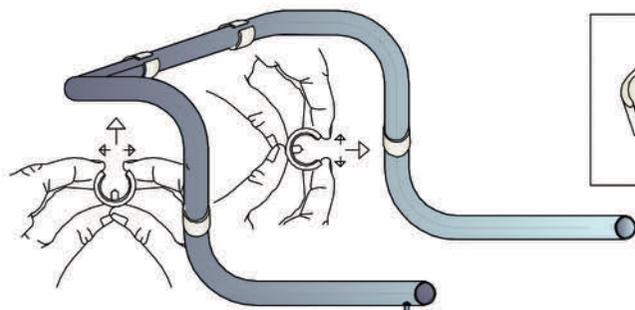


A. Montare le "pinze con piolo" in plastica in corrispondenza dei fori sulle maniglie di appoggio (vedi figure di fianco) Accertarsi che i pioli sia ben inserito nel foro.

Da non usare in caso di contatto con ferite evidenti o alterazioni

B. Inserire le maniglie di appoggio nel telaio della seduta (Una leggera forzatura è voluta per frenare lo scorrimento) premere il piolo per inserirlo e posizionarlo in uno dei 5 fori in funzione della larghezza della vasca (vedi dettaglio 2.) Posizionare il sedile sulla vasca, considerando la larghezza interna della vasca da bordo a bordo, compreso tra cm 66 e massimo cm 75. Non si garantisce la tenuta del sedile al di fuori di tali valori. Mantenere la seduta centrata rispetto ai punti di appoggio delle maniglie. Inserire lo schienale e fermare con il piolo inserito nell'apposito foro. (vedi dettaglio 1.)

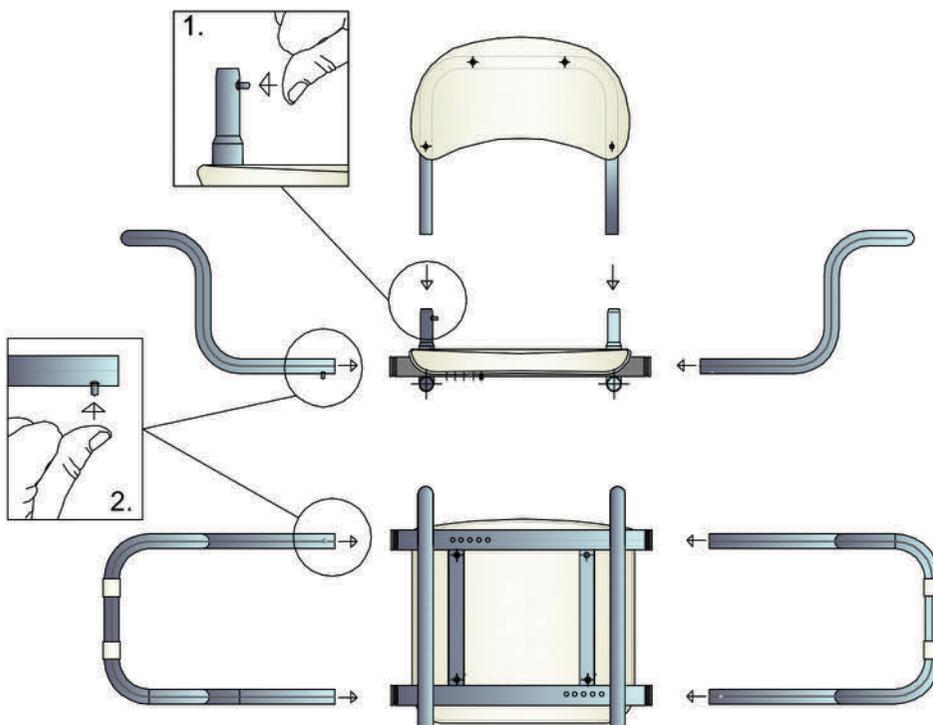

C. Risultato finale

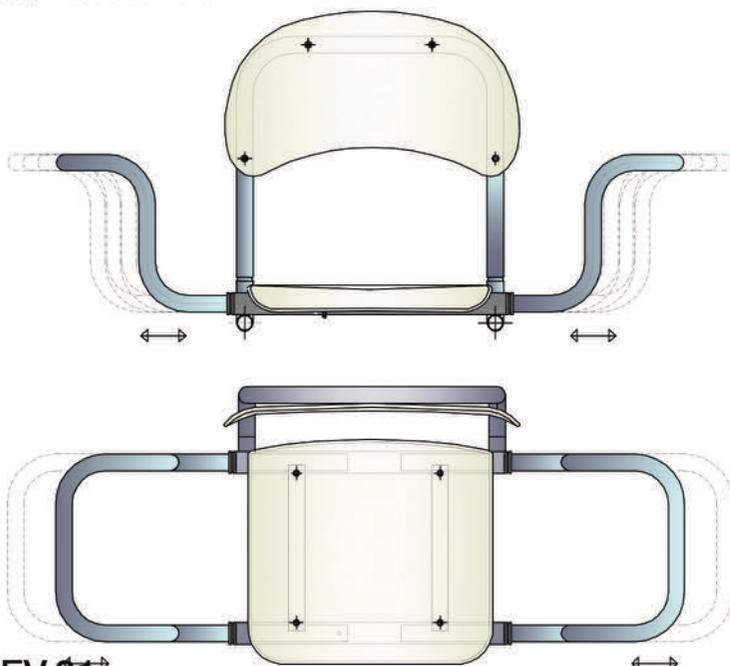

Mantenere sempre una posizione corretta una volta seduti sul sedile evitando sbilanciamenti eccessivi e sedendosi al centro della seduta. Prima di ogni utilizzo e comunque periodicamente, verificare il corretto assetto del sedile per vasca. Mantenere all'asciutto il sedile dopo l'utilizzo.

MANUTENZIONE:

lavare periodicamente il sedile con sapone neutro. Accertarsi che le parti siano correttamente montate e i pioli di fermo delle maniglie e dello schienale negli appositi spazi.

- Questo prodotto contiene piccole parti che, se ingerite, potrebbero provocare soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Superfici particolarmente lisce possono aver un effetto negativo sulla resistenza allo slittamento.

- Non salire sul sedile
- Non sollevare con persona seduta

